

DESINFEKTION

WipeClean



WipeClean Ethanol Disinfection 80%

Engangsklude klar til brug. Til desinfektion af overflader og ikke-invasivt medicinsk udstyr, der tåler alkohol.

MED WIPECLEAN SPARER DU TID OG ØGER SIKKERHEDEN

Ethanol Disinfection 80% kludene er klar til brug direkte fra pakken, og de er den optimale løsning til desinfektion af overflader, der tåler alkohol i f.eks. sundheds- og fødevareresektoren. Godkendt til fødevarerVirksomheder (J.nr. 2015-29-7105-00105).

Kludene er pakket i forpakninger med lufttætte lukninger og nem lukning. De består af 100% polyester, hvilket har den klare fordel, at kludene afgiver så meget desinfektionsvæske til overfladen som muligt. Herved opnås den størst mulige desinfektionseffekt.

GODT AT VIDE OM WIPECLEAN ETHANOL DISINFECTION 80%

●●○ Intermediate-Level

Indholdsstoffer: Ethanol 700g/kg, Isopropanol 50g/kg. Uden parfume og farvestoffer

Holdbarhed: Uåbnet 2 år. Efter åbning er kludene holdbare i 6 måneder

Varenr.	Forpackningsstr.	Anvendelse
5252	Mini - 100 wipes 20 x 20 cm	Til desinfektion af 0,5 m ²
5211	Small - 25 wipes 20 x 30 cm	Til desinfektion af 1 m ²
5212	Large - 20 wipes 40 x 30 cm	Til desinfektion af 2,5 m ²

* Biocider skal anvendes på forsvarlig vis.

Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.



EGENSKABER

Da kludene er både kryds- og z-foldet, kan de nemt tages ud af pakken enkeltvist, foldet og klar til brug.

BRUGSVEJLEDNING

Anvendes på rengjorte og tørre overflader. Tør overfladen, så den holdes fugtig i henhold til angiven kontakttid på forpakningen.

Produktet må ikke anvendes til hudpleje. Anvend handsker i henhold til EN 374.

Produktet er ikke velegnet til træ, naturgummi, malede og papiroverflader samt visse plastmaterialer. Tjek producentens brugsvejledning omkring desinfektion af udstyret før brug.

ANVENDELSESOMRÅDER

- Hospitaler
- Plejehjem
- Tandlægeklinikker
- Daginstitutioner

plum

Ethanol Disinfection 80%

Ethanol Disinfection 80% indeholder **IKKE** sæbe. Opfylder således anbefalingen fra SSI om at rengøre først og derefter desinficere. Godkendt i henhold til en række EN-standarder ift. baktericid, virucid og fungicid effekt. Dokumenteret effekt mod bl.a. norovirus. Vurderet af CEI til Intermediate-Level desinfektion.

Bakterier		
Organisme	Kontaktid	Test standard
Enterococcus hirae	1 min	EN16615 EN13727 EN13697
Escherichia coli	1 min	EN13697
VRE	1 min	EN16615 EN13727 EN13697
MRSA	1 min	EN16615 EN13727 EN13697
Pseudomonas aeruginosa	1 min	EN16615 EN13727 EN13697
Staphylococcus aureus	1 min	EN16615 EN13727 EN13697

Virus		
Organisme	Kontaktid	Test standard
HEP B HEP C HIV Influenza A H1N1 Murine norovirus Adenovirus	1 min	EN14476

Svampe / Gær		
Organisme	Kontaktid	Test standard
Aspergillus brasiliensis	2 min	EN13697 EN13624
Candida albicans	1 min	EN16615 EN13624
	2 min	EN13697

Tuberkulose / Mykobakterier		
Organisme	Kontaktid	Test standard
Mycobacterium terrae Mycobacterium avium	1 min	EN14348



Produktet er CE-mærket.
Sikkerhedsdatablad fremsendes efter ønske.