

Tid og Bluetooth®-justering


1. Justér dato / klokkeslæt / Bluetooth® på skærmen ved at indsætte eller udskifte batterierne eller holde ON / OFF / START-tasten nede i ca. 5 sekunder når apparatet er slukket. Displayet vil nu vise et blinkende tal, der indikerer året.
2. Skift året ved at trykke på Memory-tasten. Hvert tryk øger tallet. Tryk på ON / OFF / START-tasten for at bekræfte indtastningen. Skærmen viser et blinkende tal, der repræsenterer datoen.
3. Skift dato, time og minut som beskrevet i trin 2 ovenfor ved hjælp af Memory-tasten til at ændre dem og brug ON / OFF / START-tasten for at bekræfte indtastningerne.
4. Efter justering af dato / klokkeslæt vises Bluetooth®-symbolet og det blinkende ikon samtidigt på displayet. Brug Memory-tasten til at vælge, om automatisk Bluetooth®-dataoverførsel skal aktiveres eller deaktiveret. Bekræft med ON / OFF / START-tasten.
5. Tryk på ON / OFF / START-tasten igen. "0" vises igen og blodtryksmåleren er nu klar til måling.

Data Transfer via Bluetooth®

Forbind blodtryksmåleren med din smartphone


Når du skal bruge Bluetooth® for første gang, skal du besøge webstedet <http://www.rossmax.com> for de indledende opsætningsinstruktioner.

1. Download og installér den relevante applikation på din smartphone.
2. For at forbinde blodtryksmåleren med din smartphone skal du tænde apparatet, tænde for Bluetooth® og følge opsætningsinstruktionerne i app'en til din smartphone.
3. Er forbindelsen vellykket vises Bluetooth®-symbolet på displayet og fortsætter med at blinke under dataoverførslen. Den aktuelle målte værdi overføres automatisk til app'en, når målingen er afsluttet.
4. Er forbindelsen ikke lykkedes, vises Bluetooth®-symbolet ikke på displayet, og den aktuelle målte værdi overføres ikke automatisk til app'en. I dette tilfælde gemmes værdien i den valgte 'user memory zone'. Forbind igen blodtryksmåleren med din smartphone, og følg applikationsinstruktionerne indtil Bluetooth®-overførslen lykkes.

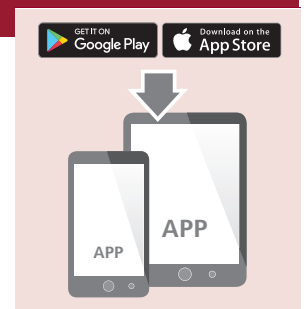

Bemærkninger:

1. Bryder du forbindelsen til din enhed, slettes dataene ikke fra app'en.
2. Hvis du genetablerer forbindelsen mellem din smartphone og din blodtryksmåler, vil al tidligere historik blive gemt i applikationen.
3. Bluetooth® dataoverførsel reducerer batterikapaciteten.

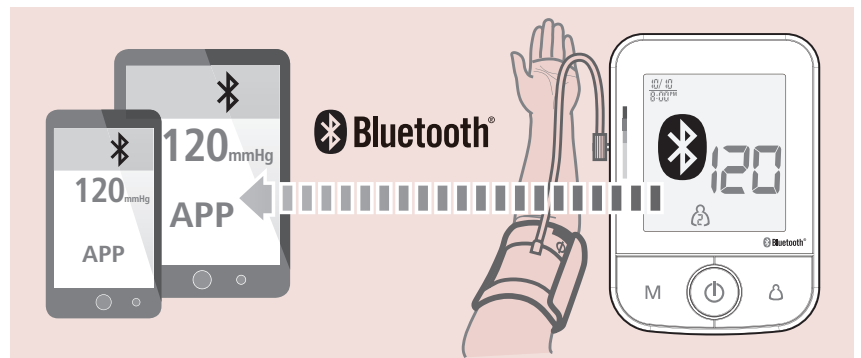

Dataoverførsel til PC

Med købet af Rossmax' blodtryksmåler medfølger et gratis, integreret og brugervenligt blodtryksmålermonitoreringssoftware, som kan downloades og installeres på din computer. Du kan være nødt til at tilkøbe en specialdesignet USB-kabel for at forbinde Rossmaxs blodtryksmåler og din PC.

Besøg webstedet <http://www.rossmax.com> for at fortsætte download- og installationsprocessen.

